

Oticon ON App
voor Android
en iOS



Gebruiksaanwijzing

oticon
PEOPLE FIRST

Inleiding

In dit boekje vindt u informatie over de app. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk Waarschuwingen niet. Hierdoor kunt u de mogelijkheden van de app optimaal benutten.

Met de app voor iPhone, iPad, iPod touch en Android™ apparaten kunt u de Oticon hoortoestellen rechtstreeks bedienen.

De App is beschikbaar in de App Store® en in Google Play™.



Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op versie 2.0.x van de app.

Zorg ervoor dat u de app altijd bijwerkt naar de nieuwste compatibele versie.

Neem voor verdere vragen over het gebruik van de app contact op met uw hoorzorgprofessional. Sommige instellingen zijn afhankelijk van de aanpassing die door de hoorzorgprofessional is gedaan.

Dit boekje is voorzien van een navigatiebalk, zodat u eenvoudig door de verschillende hoofdstukken kunt navigeren.

| **Over** | [Aan de slag](#) | [Gebruik](#) | [Tinnitus](#) | [Opties](#) | [Waarschuwingen](#) | [Aanvullende informatie](#) |

Apple, het Apple logo, iPhone, iPad, en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc. Android, Google Play en het Google Play logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Beoogd gebruik

De app is bedoeld om gebruikers van draadloze hoortoestellen te helpen bij het bedienen van de functies die hun hooroplossing biedt.

Bedoelde gebruikersgroep

De app is bedoeld voor gebruikers (volwassen en kinderen ouder dan 36 maanden) van draadloze hoortoestellen of verantwoordelijke verzorgers.

Disclaimer voor de app

Oticon neemt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van deze app buiten het beoogde gebruik of de waarschuwingen.

BELANGRIJKE OPMERKING

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de hoortoestellen voor details over de functionaliteit van uw specifieke hooroplossing.



Inhoudsopgave

- 6 | [Systeemvereisten](#)
- 7 | [De app installeren](#)
- 8 | [Uw mobiele apparaat koppelen en verbinden met uw hoortoestellen](#)
- 10 | [Startscherm](#)
- 11 | [Account aanmaken](#)
- 12 | [Volume wijzigen en dempen](#)
- 13 | [Programma wijzigen](#)
- 14 | [Geluid van de televisie en externe microfoon](#)
- 15 | [Tinnitus SoundSupport](#)
- 22 | [OpenSound Booster](#)
- 23 | [Overige functies](#)
- 25 | [Privacybeleid](#)
- 26 | [HearingFitness](#)
- 29 | [IFTTT](#)
- 30 | [Apple Watch](#)
- 34 | [Problemen oplossen](#)
- 35 | [Waarschuwingen](#)
- 36 | [Technische informatie](#)
- 37 | [Beschrijving van symbolen](#)

Om de app te kunnen gebruiken heeft u het volgende nodig:

- Apple apparaten: iOS besturingssysteem.
- Android apparaten: Android besturingssysteem.
- Een Oticon hoortoestel dat gekoppeld kan worden met iOS of Android apparaten.

Voor informatie over welke hoortoestellen gebruikt kunnen worden met de app en welke versie iOS/Android nodig is, gaat u naar www.oticon.nl/compatibility

Op iOS (Apple apparaten)

1. Ga naar de App Store en zoek naar de app.
2. Tik in het zoekresultaat op de app.
3. Tik op 'DOWNLOAD' en vervolgens op 'INSTALLEER'.
4. Indien gevraagd, meldt u zich aan bij de App Store om de installatie te voltooien.

Op Android

1. Ga naar Google Play en zoek naar de app.
2. Tik in het zoekresultaat op de app.
3. Tik op 'INSTALLEER'.

Wanneer de installatie is voltooid, ziet u het pictogram van de app op het startscherm van uw mobiele apparaat en is de app gereed voor gebruik.



Uw mobiele apparaat koppelen en verbinden met uw hoortoestellen

Apple apparaten

Voordat u de app op een Apple apparaat kunt gebruiken, moet u het apparaat koppelen met uw hoortoestellen. Zorg er altijd voor dat de batterijen in de hoortoestellen volledig zijn opgeladen.

1. Ga naar het menu "Instellingen" op uw Apple apparaat en controleer of Bluetooth® aan staat.
2. Selecteer vervolgens "Toegankelijkheid".
3. Selecteer 'Hoortoestellen'.
4. Plaats de hoortoestellen dicht bij uw Apple apparaat en zet uw hoortoestellen uit en aan. Hierdoor gaan ze voor drie minuten in de koppelingsstand.
5. Wanneer de hoortoestellen zijn gedetecteerd, selecteert u ze op het scherm van het Apple apparaat.
6. Bevestig het verzoek tot Bluetooth koppeling. Dit moet voor elk hoortoestel worden gedaan.

Wanneer u de hoortoestellen heeft gekoppeld met het Apple apparaat, opent u de app om de verbinding tot stand te brengen.


Zorg ervoor dat Bluetooth nog steeds aan staat. De app zoekt naar de hoortoestellen totdat de verbinding tot stand is gebracht.

Tik op 'Doorgaan' en u bent klaar om de app te gebruiken.

Android apparaten

Voor een Android apparaat wordt het koppelen met de hoortoestellen en de verbinding met het apparaat en de hoortoestellen in de app gedaan. Zorg er altijd voor dat de batterijen in de hoortoestellen vol of volledig opgeladen zijn.

1. Zet de hoortoestellen tijdens het koppelen niet uit en zorg ervoor dat ze binnen 20 cm afstand van het mobiele apparaat zijn.
2. Controleer of Bluetooth® aan staat op uw apparaat.
3. Open de app.
4. De app zoekt automatisch naar hoortoestellen.
5. Zet de hoortoestellen uit en aan. Hierdoor gaan ze voor drie minuten in de koppelingsstand.
6. Wacht terwijl de app de hoortoestellen detecteert.
7. Selecteer de hoortoestellen en ga verder.
8. De app zal proberen uw hoortoestellen te koppelen en verbinden.
9. Wanneer de app is verbonden met de hoortoestellen, ziet u de successtatus.
10. Klik op 'Doorgaan' om verder te gaan en de app te starten.

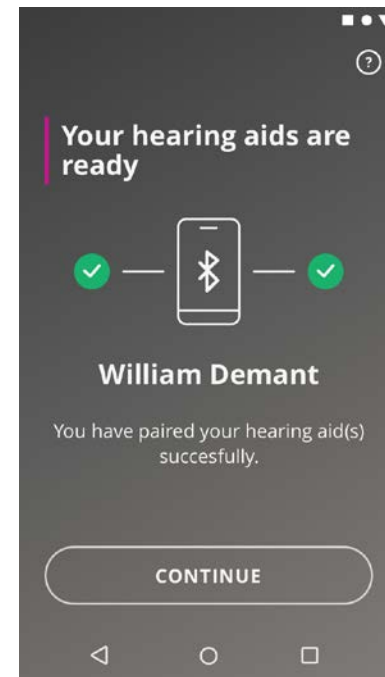

Startscherm

U heeft toegang tot alle functies van de app vanuit het startscherm. U kunt het overal vanuit de app openen door op het pictogram 'Start' onderin het scherm te tikken.

1. 'Remote control' geeft toegang tot de hoortoestelprogramma's en de volumeregeling.
2. Vanuit 'Hoortoestel' kunt u het batterijniveau van de hoortoestellen controleren, de 'Gebruiksaanwijzing' lezen en de hoortoestellen vinden.
3. Met 'HearingFitness' kunt u persoonlijke luisterdoelen instellen.
4. Het 'Internet of Things' geeft toegang tot IFTTT functies.
5. De 'Hoorgids' geeft toegang tot verschillende gidsen waar u kunt leren hoe u het meeste uit de hoortoestellen haalt.
6. Vanuit 'Instellingen' kunt u de app volgens uw voorkeuren afstellen.




Account aanmaken

Om de HearingFitness functie en de IFTTT dienst (If This, Then That) te kunnen gebruiken, dient u een account aan te maken. U heeft dit account niet nodig om andere programma's of functies van de app te kunnen gebruiken. U heeft wel een e-mailadres nodig om een account aan te maken.

De eerste keer dat u HearingFitness of IFTTT opent, wordt u gevraagd een account aan te maken.


Volg de aanwijzingen op het scherm.

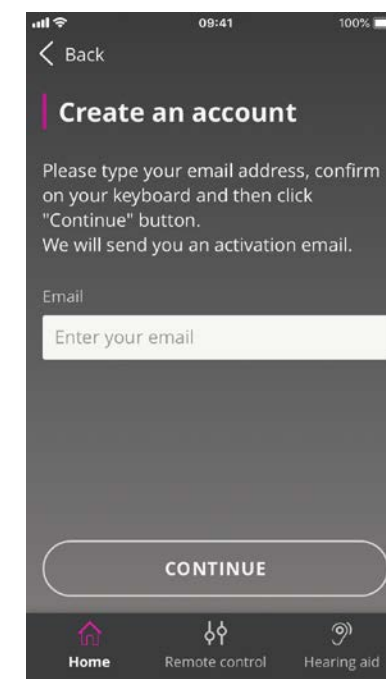

Volume wijzigen en dempen

Selecteer 'Remote control' vanuit het startscherm om de volumeregeling te openen. Het volume kan in beide hoortoestellen tegelijkertijd worden gewijzigd of in elk hoortoestel afzonderlijk. De volumewijziging is alleen van toepassing op het geselecteerde programma (zie volgende paragraaf).

1. Volume-indicator. '0' is het opstartvolume zoals voorgeschreven door uw hoorzorgprofessional.
2. Schuif omhoog of omlaag om het volume harder of zachter te zetten.
3. Schakel tussen volumeregeling in beide hoortoestellen of elk hoortoestel afzonderlijk.
4. Tik om de microfoon van het hoortoestel te dempen of de demping op te heffen.

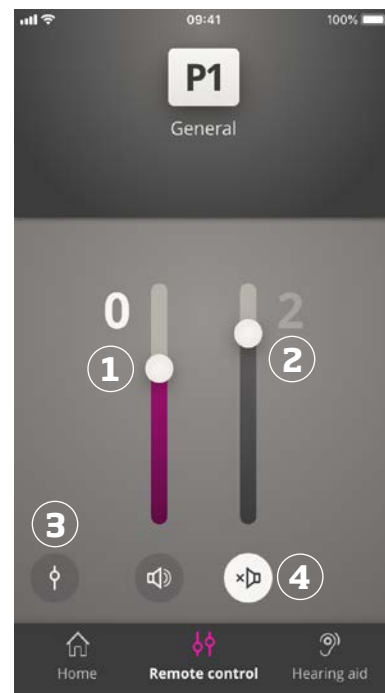

Programma wijzigen


Selecteer 'Remote control' vanuit het startscherm om de programma's in uw hoortoestellen te openen. In elk programma kunt u het volume aanpassen zoals beschreven in de vorige paragraaf.

U kunt maximaal vier verschillende luisterprogramma's hebben. Deze worden gedefinieerd door uw hoorzorgprofessional tijdens de aanpassessie.

Tik op het pictogram programma's bovenin het scherm om de programma's te openen. Veeg naar links om de volledige lijst te zien. Tik op het pictogram of het programma dat u wilt openen. De achtergrondkleur van het pictogram van het geselecteerde programma gaat wit branden. Selectie van het programma betekent dat het programma op het hoortoestel ook wordt gewijzigd.

Als de hoortoestellen zijn gekoppeld met een TV Adapter en/of met een ConnectClip, zullen er één of twee extra programma's beschikbaar zijn in de lijst.

Het aantal programma's voor Tinnitus ondersteuning is afhankelijk van de aanpassing van het hoortoestel.

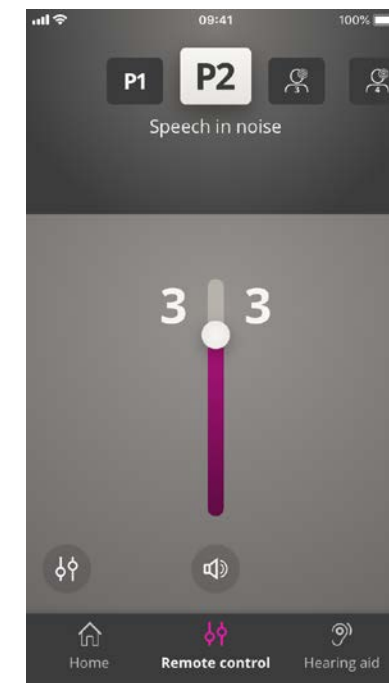

Geluid van de televisie en externe microfoon

Als uw hoortoestellen zijn gekoppeld met een TV Adapter (of EduMic) en/of een ConnectClip, kunnen de volgende programma's worden geselecteerd uit de lijst met programma's in de app.

TV Adapter/EduMic


Als de hoortoestellen zijn gekoppeld met een TV Adapter kunt u het geluid bedienen dat van uw televisie naar de hoortoestellen wordt gezonden. Selecteer 'Streaming' voor het regelen van het geluidsvolume dat van uw televisie naar uw hoortoestellen wordt gezonden. Om het volume te regelen van het externe geluid dat wordt opgevangen door de hoortoestellen, selecteert u 'Omgeving'.

Als de hoortoestellen zijn gekoppeld met EduMic, kunt u het programma gebruiken voor bediening van het geluid dat wordt verzonden vanaf Oticons draadloze microfoon voor educatieve doeleinden.

Remote mic (ConnectClip)

Selecteer 'Mic geluid' voor het regelen van het geluidsvolume dat van uw ConnectClip naar uw hoortoestellen wordt gezonden. Om het volume te regelen van het externe geluid dat wordt opgevangen door de hoortoestellen, selecteert u 'Omgeving'.

Voor informatie over het regelen van het volume, raadpleeg de paragraaf 'Volume wijzigen en dempen'.

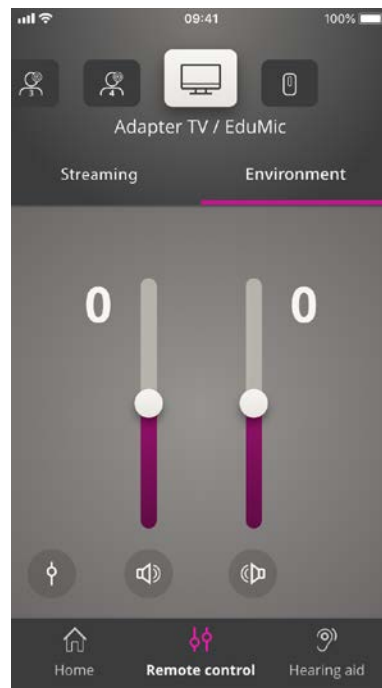

Tinnitus SoundSupport

Beoogd gebruik van Tinnitus SoundSupport

Tinnitus SoundSupport is een tool die geluiden genereert om tijdelijk verlichting te brengen aan mensen die lijden aan tinnitus, als onderdeel van een tinnitusbehandelprogramma.

Het is bedoeld voor volwassenen (18 jaar of ouder).

Tinnitus SoundSupport is bestemd voor erkende hoorzorgprofessionals (audiologen, hoortoestel-specialisten of KNO-artsen) die bekend zijn met het beoordelen en behandelen van tinnitus en gehoorverlies. De aanpassing van Tinnitus SoundSupport dient te worden uitgevoerd door een hoorzorgprofessional als onderdeel van een tinnitusbehandelprogramma.

Tinnitus SoundSupport is een geluidsgenerator die kan worden geïntegreerd in uw hoortoestellen. Speciaal ontwikkelde programma's in de hoortoestellen stellen u in de mogelijkheid om verschillende geluiden af te spelen die u kunnen helpen om uw aandacht van uw tinnitus af te leiden.

Tijdens de aanpassing kan uw hoorzorgprofessional Tinnitus SoundSupport in een of meerdere programma's mogelijk maken. U heeft er toegang toe samen met de andere programma's bovenaan het scherm.

Voor informatie over beperkingen van het gebruik van deze programma's leest u de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestellen, of neemt u contact op met uw hoorzorgprofessional.

Selecteer tinnitusprogramma met verlichtende geluiden

Selecteer 'Remote control' van het startscherm en veeg door de lijst met programma's. Tik op het programma dat u wilt openen.

Voor meer informatie over programma's, raadpleegt u de paragraaf 'Programma wijzigen'.


Tinnitusgeluidsniveau wijzigen

Selecteer 'Ondersteunend geluid' om het volume van de tinnitusgeluiden te wijzigen.

Wijzig het volume van het tinnitusprogramma door omhoog of omlaag te vegen op de schuifregelaars. Dit kan voor elk hoortoestel afzonderlijk worden gedaan of voor beide hoortoestellen tegelijkertijd.

Voor meer informatie over volumeregeling, raadpleegt u de paragraaf 'Volume wijzigen'.

Om het volume te regelen van het externe geluid dat wordt opgevangen door de microfoons van de hoortoestellen, selecteert u 'Omgeving'.

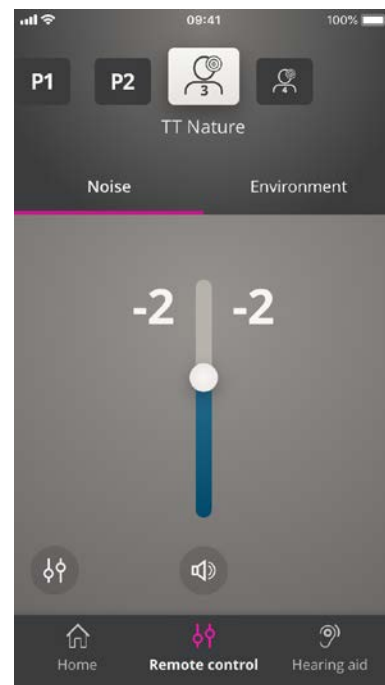

Geavanceerde tinnitusopties



Een speciaal icoontje rechtsonder in het scherm geeft aan of u toegang heeft tot de geavanceerde optie van de tinnitusverlichtende geluiden. Voor iOS apparaten wordt dit icoontje weergegeven door een pijltje (1), bij Android apparaten is dit een icoontje met drie kleine stipjes erin (2).

Klik op het icoontje om toegang te krijgen tot de geavanceerde opties. Als het icoontje wordt aangeklikt verschijnen de geavanceerde opties.

Bij iOS apparaten wordt er naar beneden gescrold om de instellingen weer te geven.

Bij Android apparaten verschijnen de geavanceerde opties in een nieuwe laag die op het scherm wordt weergegeven.

De beschikbaarheid van de geavanceerde tinnitusopties hangen af van de aanpassing van het programma zoals afgesteld door uw hoorzorgprofessional.

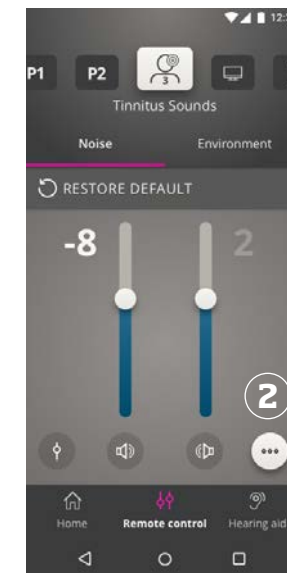
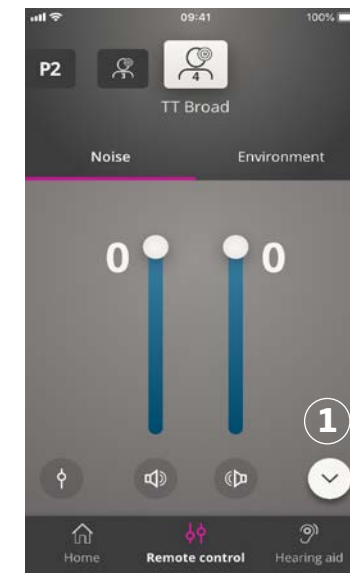


Geluidsvariaties en equalizer

De geavanceerde tinnitusopties stellen u in staat om de geluidsvariaties (1 voor iOS, 2 voor Android weergave) en de equalizer te veranderen (3 voor iOS, 4 voor Android weergave).

Ze kunnen worden toegepast wanneer het nodig is om de manier waarop het geluid in de hoortoestellen wordt afgespeeld aan te passen.

Met deze instellingen bent u in staat om het geluid zo aan te passen zodat uw tinnitus wordt gemaskeerd naar uw behoeften.

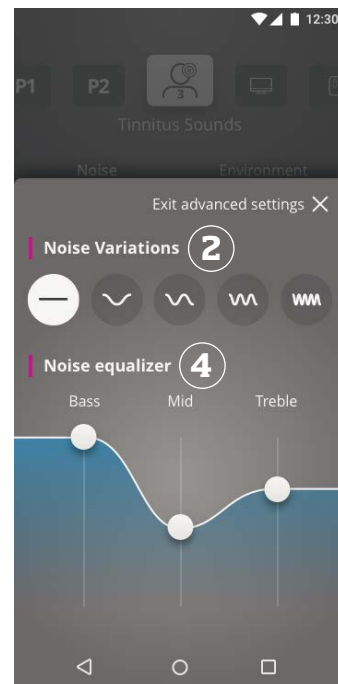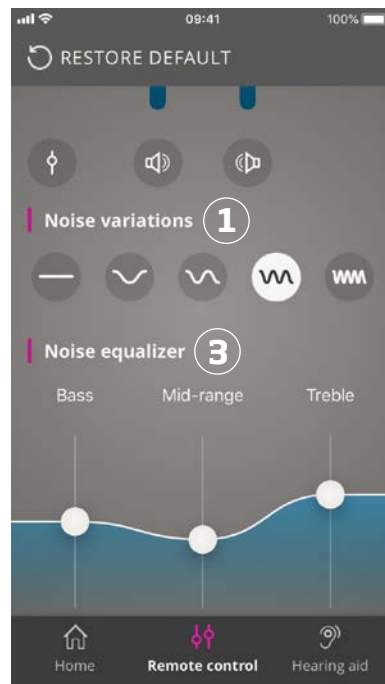

Geluidsvariaties:

Geluidsvariaties opties maken het mogelijk de variabiliteit van het geluid te veranderen:


-  Geluid is constant
-  Geluid is variabel in geringe mate, golven zijn langzaam en subtiel
-  Geluid is variabel in geringe mate, golven zijn merkbaarder
-  Geluid is zeer variabel, golven zijn vrij actief
-  Geluid is variabel in grote mate, golven zijn erg actief

Equalizer:

De equalizer maakt het mogelijk om de verschillende karakteristieken (banden) van het tinnitusverlichtende geluid te veranderen. Met deze instellingen kunt u het volgende aanpassen: Basgeluiden (1) - het laagste gedeelte van het muzikale bereik, midden bereik geluiden (2) en Treble (3) - hoogtonige geluiden.

De drie banden kunnen worden aangepast op de decibel (luidheids) schaal door te swipen bij de schuifregelaars. Oorspronkelijke staat ingesteld door de hoorzorgprofessional) voor elke band is 0 decibels (dB) (1). Wanneer u de schuifregelaars naar boven of beneden beweegt op de equalizer, dan verhoogt of verlaagt u de luidheid op die specifieke band.

Het luidheidsniveau kan worden verlaagd tot 24 dB (2).

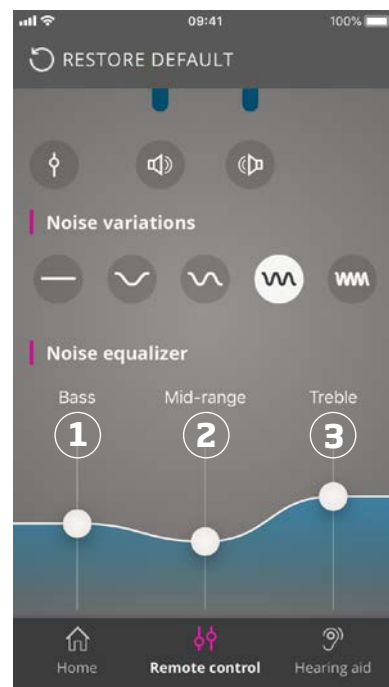


Voorbeelden:

- A. Als u meer bas in uw hoortoestellen wenst, dan dient u de bas band in te stellen in de oorspronkelijke staat (0 dB) en de schuifregelaar naar beneden te bewegen om de Treble tonen te verlagen.
- B. Als u meer Treble geluid wenst, een beetje middenbereik geluid en geen bas, dan dient u: Treble in te stellen in de oorspronkelijke staat (0 dB), de schuifregelaar naar beneden om het middenbereik te verlagen en beweeg de schuifregelaar maximaal naar beneden om de basfrequenties te verlagen.

Individuele voorkeuren opslaan


Telkens als u uw tinnitusverlichtende geluidsvorkeuren aanpast, zal de app ze onthouden en gebruiken als uw vookeursinstellingen. Er is geen extra actie nodig aangezien de app dit automatisch opslaat.

Om de instellingen te vergeten drukt u gewoon op "Standaard herstellen".

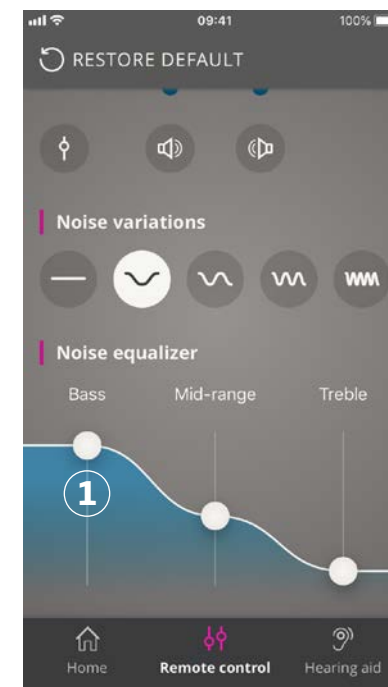


OpenSound Booster

OpenSound Booster kan nuttig zijn als u het moeilijk vindt u te focussen op spraak of als u moe bent na een lange dag werken. Als het is geactiveerd, verschuift het de instellingen van de hoortoestellen in een geavanceerd modus

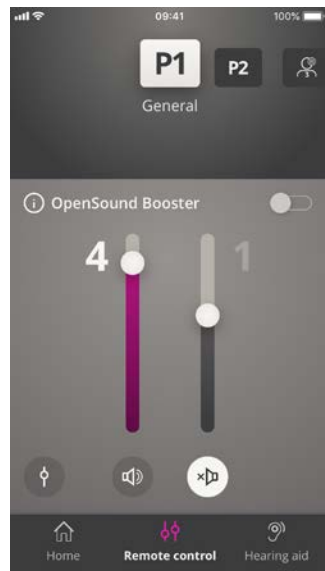

waar lawaai, specifiek van de kanten achter u kan worden verminderd. Om OpenSound Booster te (de)activeren gebruikt u de horizontale schakelaar boven de volumeschuifjes. Als u het activeert, wordt de schakelaar groen.

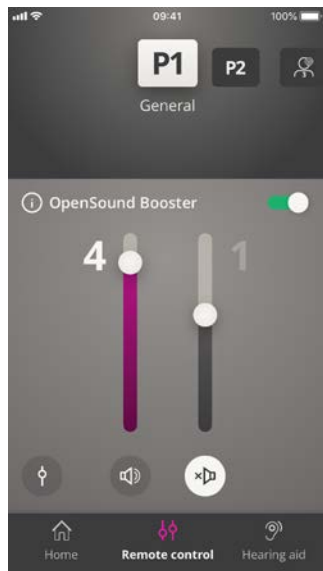

Let op:

De functie kan in de app uitgeschakeld worden, maar het wordt ook gedeactiveerd bij het wijzigen van het programma, door het openen van de batterijlade of door het opnieuw verbinden met de hoortoestellen.

Bij oplaadbare hoortoestellen wordt de booster uitgeschakeld als de hoortoestellen in de lader worden geplaatst of handmatig uitgezet wordt door het lang indrukken.

NB: OpenSound Booster is alleen beschikbaar voor hoortoestellen met OpenSound Navigator. Bezoek a.u.b. to www.oticon.nl/compatibility voor meer informatie. Het kan worden geactiveerd in elk programma waar Open Sound Navigator actief is.


Overige functies

Batterijniveau

U kunt de app gebruiken om het batterijniveau van uw hoortoestellen te controleren. Op deze manier kunt u gemakkelijk zien of de batterijen vervangen of opgeladen dienen te worden.

Gebruiksaanwijzing

Druk op "Hoe deze app te gebruiken" in het onderdeel instellingen om de gebruiksaanwijzing van de app te lezen.

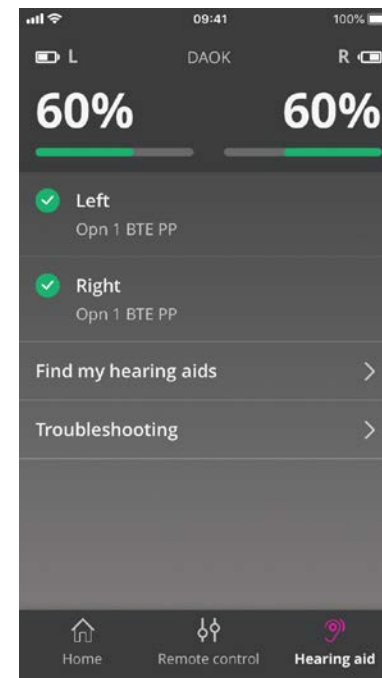

Overige functies


Zoek mijn hoortoestellen

Tik op 'Zoek mijn hoortoestellen' als u uw hoortoestellen niet kunt vinden. Een kaart geeft de laatst bekende locatie van de gekoppelde hoortoestellen toen de app werkte.

Een balk geeft aan hoe dicht u in de buurt bent bij elk verbonden hoortoestel. Als uw telefoon buiten bereik van de hoortoestellen is of de verbinding is verbroken, kunt u de datum en tijd van de laatste verbinding zien.

Op de kaart geeft de groene markering aan dat er verbinding is tussen uw hoortoestel en de telefoon. De rode markering geeft aan dat de verbinding is verbroken.

Voor de beste resultaten wordt aanbevolen dat u de app ingeschakeld laat (ofwel actief gebruikt ofwel op de achtergrond).

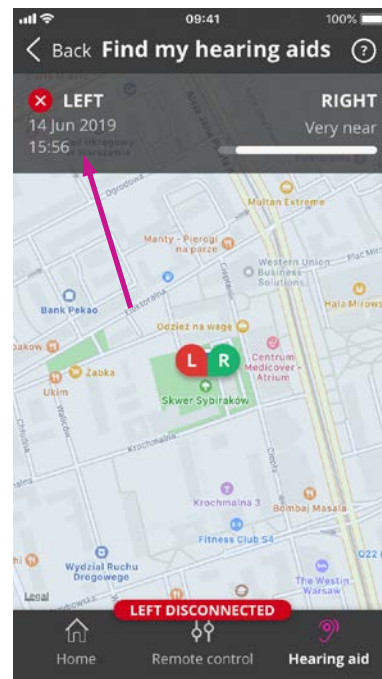


Privacybeleid

Om de HearingFitness functie en IFTTT dienst te kunnen gebruiken moet Oticon gegevens van u verzamelen. U zult om toestemming worden gevraagd wanneer u een account aanmaakt. (zie de paragraaf 'Account aanmaken').

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Als u dit doet, zult u HearingFitness en IFTTT niet meer met de app kunnen gebruiken.

Ga voor meer informatie naar <https://www.oticon.nl/about/oticon/privacy-policy#app>

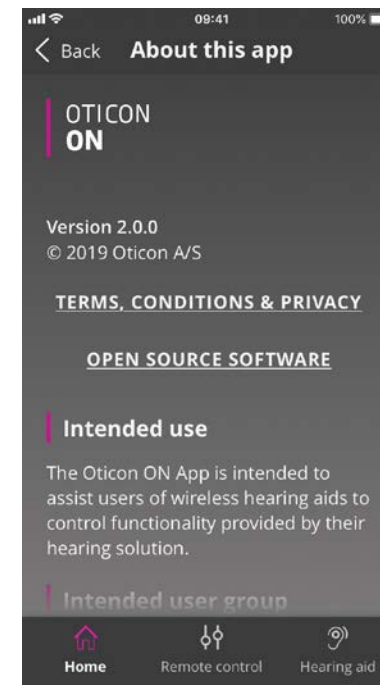

HearingFitness

HearingFitness is een functie waarmee u een persoonlijk luisterdoel kunt instellen en uw dagelijks gebruik van de hoortoestellen m.b.t. tot dat doel kunt volgen.


Voor HearingFitness heeft u een persoonlijk Oticon account nodig. Zie de paragraaf 'Account aanmaken' voor meer informatie.

Eerste gebruik

Selecteer de knop 'HearingFitness' in het startscherm.

Als u een bericht ziet dat zegt dat uw hoortoestellen een firmware-update nodig hebben, neem contact op met uw hoorzorgprofessional.

Als u nog geen Oticon account heeft, tik op 'Account aanmaken' en volg de aanwijzingen in de paragraaf 'Account aanmaken'.

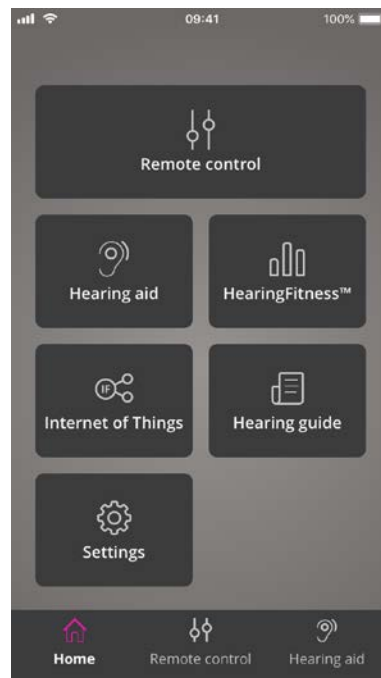


Tips:

- Om HearingFitness te kunnen gebruiken moet u ervoor zorgen dat de app continu aan staat. Hiervoor moet u de app actief gebruiken of hem op de achtergrond laten draaien. Als de app wordt afgesloten, kunnen de HearingFitness gegevens niet meer worden verzameld.
- Uw hoortoestellen moeten met de app verbonden zijn via Bluetooth. Houd Bluetooth ingeschakeld als u HearingFitness wilt gebruiken
- Als u uw hoortoestellen niet uitzet nadat u ze heeft uitgenomen (bijvoorbeeld 's nachts), worden de gegevens nog steeds door de HearingFitness functie verzameld.

Dagelijks doel instellen

Met HearingFitness kunt u een doel instellen voor het aantal uren dat u uw hoortoestellen wilt gebruiken.


Tik op de doelindicator om uw dagelijks doel te wijzigen. Als u het aantal uren heeft gekozen, drukt u op "Instellen".

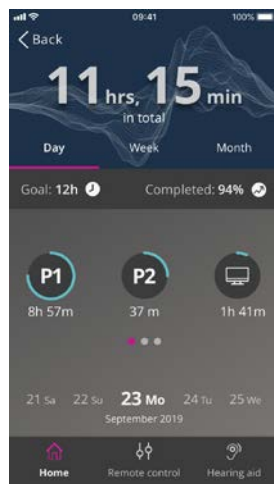

Dag-, week- en maandweergave

Tik op 'dagelijks' om het dagelijks gebruik van uw hoortoestellen te zien. U kunt het gebruik voor elk programma op een bepaalde dag zien.

Tik op 'week' of 'maand' om een grafiek te zien met wekelijks of maandelijks gebruik van uw hoortoestellen. Tik op een week of maand om de gebruiksgegevens, vorderingen en het gemiddeld aantal uren per dag voor een specifieke week of maand te zien. In een maandweergave kunt u het gemiddelde dagelijks gebruik in een bepaalde maand zien. In een weekweergave zijn de gegevens voor een bepaalde week te zien.

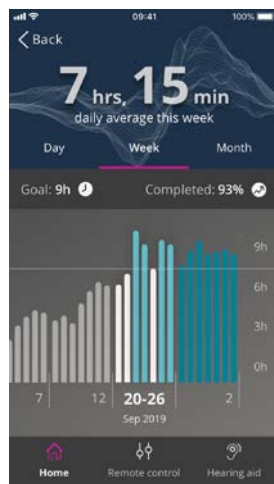

U kunt uw hoortoestellen verbinden met het internet via de app en de IFTTT (If This, Then That) dienst.

Met behulp van IFTTT kunt u dagelijkse activiteiten automatiseren, zoals thuis het licht aandoen wanneer u uw hoortoestellen aanzet, of een tekstbericht naar uw mobiele telefoon laten sturen wanneer de batterij van het hoortoestel bijna leeg is en vele andere dingen.

Om IFTTT te openen, selecteert u "Internet of things" op het startscherm.

Voor het gebruik van deze dienst heeft u een persoonlijk account nodig. Zie de paragraaf 'Account aanmaken' voor meer informatie.

Ga voor meer informatie naar <https://www.oticon.nl/hearing-aid-users/hearing-aids/accessories/ifttt>

Systemvereisten

Om de app te gebruiken met Apple Watch, heeft u het volgende nodig:



- Apple Watch Series 1-4
- OS Watch 4 en later

Voordat u de app op uw Apple Watch kunt gebruiken, dient u de app te installeren op uw iPhone en het apparaat te koppelen met de Apple Watch. Zorg ervoor dat Bluetooth aan is op de iPhone.

Volume wijzigen en dempen op de Apple Watch


Met Apple Watch krijgt u toegang tot de volumebediening van uw hoortoestellen. Het volume wordt gewijzigd in beide hoortoestellen tegelijkertijd. Het volume wijzigen is alleen van toepassing op het geselecteerde programma (zie het volgende hoofdstuk).

1. Volumeniveau indicator. "0" is het opstartvolume zoals voorgeschreven door uw hoorzorgprofessional.
2. Draai de digitale kroon om het volume te verhogen of verlagen.
3. Tik twee keer op de volumeniveau indicator om te dempen of om de demping van de hoortoestelmicrofoons op te heffen.

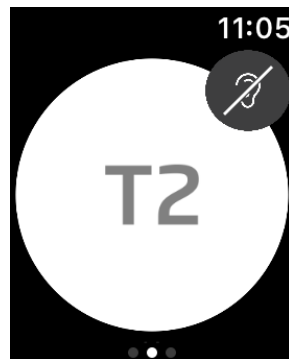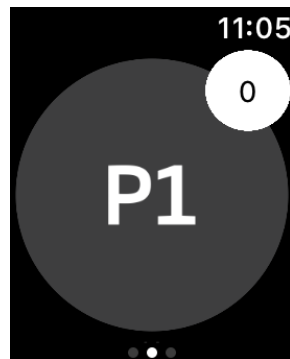

Programma wijzigen op de Apple Watch

Swipe naar links vanuit het basisscherm om toegang te krijgen tot de programma's in uw hoortoestellen. In elk programma kunt u het volume aanpassen zoals beschreven in het vorige hoofdstuk).

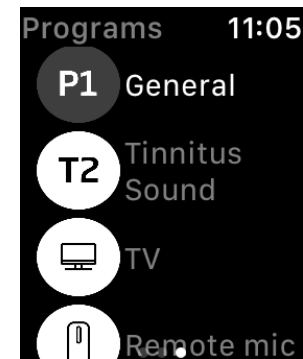


1. Tik de programma-icoon aan in de lijst om toegang te krijgen tot de programma's.
2. Swipe naar beneden om de volledige lijst te zien. Tik de icoon aan van het programma waar u toegang toe wenst.
3. De achtergrondkleur van de icoon van het geselecteerde programma wordt grijs.

Het selecteren van het programma zal resulteren in het veranderen van het programma, ook in het hoortoestel.

Apple Watch

Controleer het batterijniveau op de Apple Watch

Swipe naar rechts vanaf de basis app view om toegang te krijgen tot het batterijniveau scherm. Op deze manier kunt u eenvoudig zien of de batterijen dienen te worden vervangen of opgeladen.

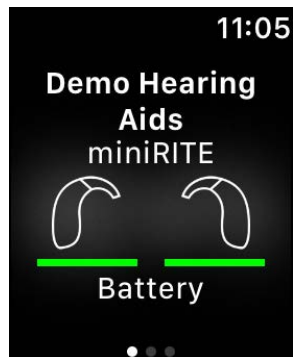

Apple Watch complicatie

Met de app is het mogelijk om de Apple Watch complicaties in te stellen (als complicaties beschikbaar zijn bij de geselecteerde wijzerplaat). Het is een handig icoontje dat dient als een snelkoppeling die je kunt plaatsen op de wijzerplaat om snel toegang tot de app te hebben (1).



Als u hulp nodig heeft met koppelen en verbinden, tik op het vraagteken in de rechterbovenhoek van het scherm. U kunt ook 'Problemen oplossen' kiezen in het menu 'Hoortoestel' (toegankelijk vanaf het startscherm). Als u problemen blijft ondervinden, kunt u contact opnemen met uw hoorzorgprofessional of de paragraaf met veelgestelde vragen bekijken: <https://www.oticon.nl/hearing-aid-users/support/faq/wireless-accessories>



In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient u uzelf geheel vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen en de inhoud van dit boekje voordat u de app gaat gebruiken. Raadpleeg uw hoorzorgprofessional indien u een onverwachte werking van of voorval met de app ervaart.

De app kan de programmakeuze en het volume van het aangesloten hoortoestel regelen. Daarom moet de app uitsluitend door de gebruiker van het hoortoestel worden bediend of door de verantwoordelijke verzorgers of hoorzorgprofessionals. Voorkom dat overige derden de app bedienen.

Afleiding van de gebruiker

Het gebruik van de app kan u afleiden in situaties waar volledige concentratie nodig is. Let op uw omgeving wanneer u de app gebruikt.

De verbinding tussen de hoortoestellen en de mobiele telefoon kan worden verbroken door signaalstoring, een bijna lege batterij, de afstand tussen de telefoon en de hoortoestellen enz. Indien dit zich voordoet en invloed heeft op de verwachte functionaliteit van de hoortoestellen, raden wij u aan de hoortoestellen opnieuw op te starten.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de hoortoestellen voor details over de functionaliteit van uw specifieke hooroplossing.

 Vervaardigd door:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken
2019 www.oticon.nl

CE 0543

Beschrijving van in dit boekje gebruikte symbolen	
	Waarschuwingen Tekst aangeduid met een waarschuwingssymbool moet worden gelezen voordat het toestel wordt gebruikt.
	Fabrikant Het apparaat is geproduceerd door de fabrikant wiens naam en adres naast het symbool staan vermeld. Duidt de fabrikant van medische hulpmiddelen aan zoals gedefinieerd in EU-Richtlijnen 90/385/EEG, 93/42/EEG en 98/79/EG.
	CE-markering Het apparaat voldoet aan Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen. Het viercijferige nummer duidt de aangemelde instantie aan.
	Raadpleeg de elektronische gebruiksaanwijzing Dit wijst erop dat de gebruiker de elektronische gebruiksaanwijzing dient te raadplegen.



www.oticon.nl

oticon
PEOPLE FIRST